

Lente de medición automática L900

Pantalla de 70 pulgadas con pantalla HDtouch y color

Un diseño sencillo, de moda, abundante y con gran atmósfera

Fuente de luz verde LED, sin necesidad de compensación ABBE

Caja de ABS apta para uso alimentario, con tasa de fallos cero según estándares de calidad

Determinar y medir rápidamente y automáticamente la lente progresiva con alta precisión.

Tecnología de medición inteligente Hartmann mejorada, más rápida, precisa y estable.

① L/Rsign

② Modo de medición

③ Visualización de datos

④ Menú

⑤ Marco VD / lente bifocal / lente trifocal

⑥ medición de la lente Leff

⑦ Modo de trabajo actual

⑧ medición de la lente derecha

⑨ Limpieza de los datos memorizados

⑩ Impresión de datos fijos

medición



Más información, futuro esperando

Main MediTech Co.,Ltd

Dirección: 776, Avenida Jingwei, Distrito de Yuzhong, Chongqing, China

Website:www.mainmeditech.com

Email:info@mainmeditech.com

Tel.: +86 236 373 2637

Supervisor Tel.: +8613618270311

ÍNDICES TÉCNICOS

rango de medición

Esfera: O a ±35D (pasos de 0.01D/0.06D/0.12D/0.25D)

Rango de medición		Precisión
<0D, ≥-5D	>0D, ≤+5D	±0. 06
<-5D, ≥-10D	>+5D, ≤+10D	±0. 09
<-10D, ≥-15D	>+10D, ≤+15D	±0. 12
<-15D, ≥-20D	>+15D, ≤+20D	±0. 18
<-20D, ≥-35D	>+20D, ≤+35D	±0. 25

Cilindro: de 0 a ±10D (pasos de 0.01D/0.06D/0.12D/0.25D)

Axis:0°to 180°(1°steps)

ADD:0 a 10D (pasos de 0.01D/0.06D/0.12D/0.25D)

Prisma: O a 15^ (0.01^)

Rango de medición	Precisión
>0△, ≤5△	0. 1△
>5△, ≤15△	0. 2△

Modo cilindro: +, +1-, -

Modo prismático: X-Y: coordenadas cartesianas H:I,0.V:U, D P-

B: coordenadas polares

mm: expresión de mm Resolución de

lectura power:0.01D/0.06D/0.12D/0.25D

medición de PD

Medición de lentes de visión única, bifocales, trifocales y lentes progresi-

vas, etc. Medición de lentes de contacto

ensayo de transmisionalidad UV

Transmitividad medible: >10%; >20% a ±10D y más

Lentes de contacto: O a ±25 D, BC de 6,00 a 9,00

Display:7.0-inch Pantalla táctil de color HD

Menú: diagrama claro y fácil de usar

Diámetro del lente: 20 mm a 100 mm

Fuente de alimentación: 100 V (±10 %) a 240 V (±10 %), 50/60 Hz, 40 A

Consumo de energía: 40 W

Weight:6.8kgs

Dimensiones: 565 mm × 350 mm × 355 mm

(Ancho × Largo × Altura); condiciones ambientales

a. Temperatura: 5-40 °C (en uso)

-20-60℃(In storage/transference)

b. Humedad:30-85% (sin condensación) (en uso)

10-95%(In storage/transference)

C. Presión atmosférica: 700-1060 hPa

d. Altitud: hasta 2000 m

e. Otros: No hay polvo ni humo nocivos

Accesorios opcionales: impresora (papel termosensible integrado, tamaño 57 mm)

Main Meditech

L900

Lensometro automático



En busca constante de lo superior y mejor, para alcanzar a ti y a nosotros.

L900



Lentesmetro automático características técnicas

Pantalla LCD HD con gráficos Full y pantalla de color de 7,0 pulgadas.
Caja de ABS importada, de grado alimentario, procedente de Estados Unidos.

medición progresiva de lentes

Determina automáticamente si se trata de una lente de visión única o progresiva, y localiza rápidamente la distancia central y la distancia de cerca. medición precisa de los valores de la


DDA en el centro de la lens progresiva

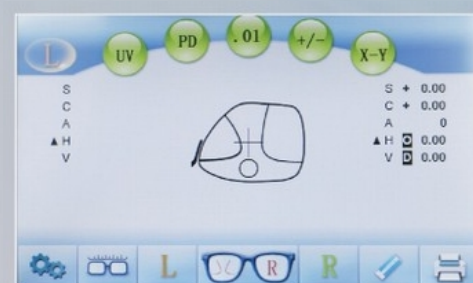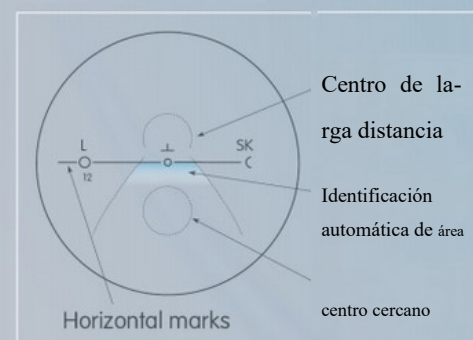

「L900 White」



Sensor Hartmann con 145 puntos de medición múltiple

Hartmann 145 puntos de medición, equipado con una cámara CCD de alta velocidad y alta eficiencia, que permite mediciones rápidas y precisas, sin necesidad de compensación ABBE.

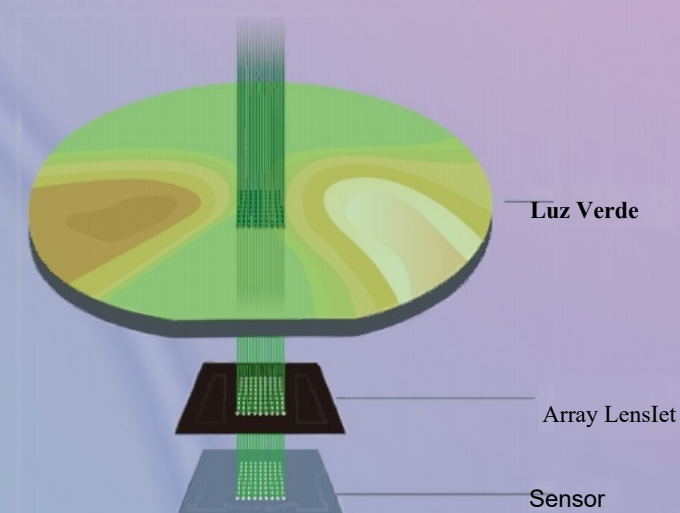

「Frame VD measurement」

Para determinar el valor de PD del marco y marcar los centros izquierdo y derecho de los rayos, primero alinee el marco con el cursor digital de PD en la pantalla. A continuación, mueve el cursor hacia arriba o hacia abajo hasta que coincida con los centros izquierdo y derecho de los rayos. El valor de PD que se muestra en la pantalla corresponde al valor de PD del marco.

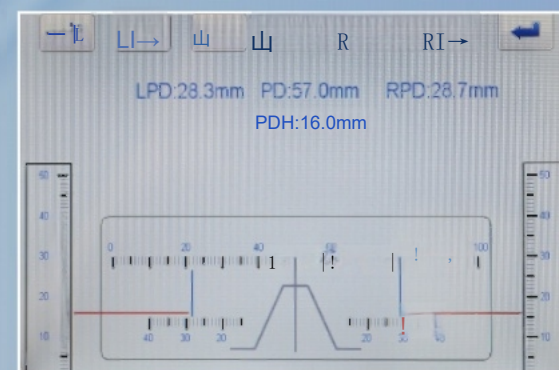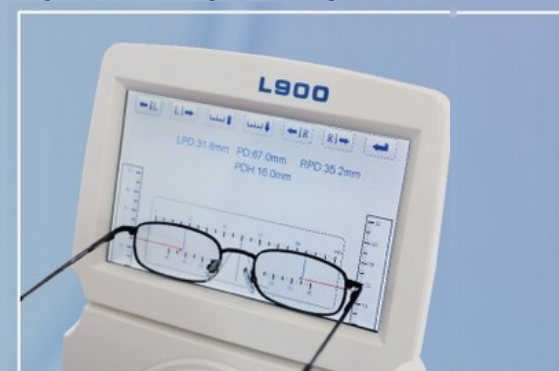

「L900 Double color」


Dispositivo de marcado fino

Gracias a un diseño estructural preciso y una montaje de alta calidad, el dispositivo ofrece un rendimiento operativo excelente y una gran estabilidad, con una posición de marcado central que garantiza un desplazamiento compensado durante un uso prolongado.





Nuevos marcadores de señalización

Dos tipos de tinta, roja y blanca, con las siguientes características: 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm. Marcado suave y efecto perfecto; la tinta no se seca ni se desborda, y los puntos son claros y redondos.

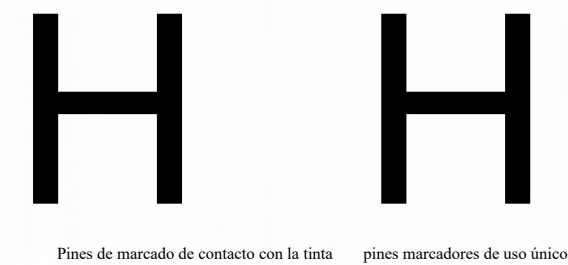

Medición de la transmisión UV

La transmisión UV de diversos lentes (lentes recubiertas, gafas, cristales, etc.) puede medirse en el rango del 0 % al 100 % con incrementos de 1 % o 5 %, lo que permite a los usuarios elegir lentes según sus necesidades reales.

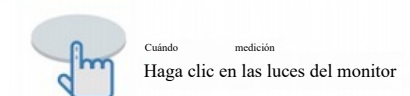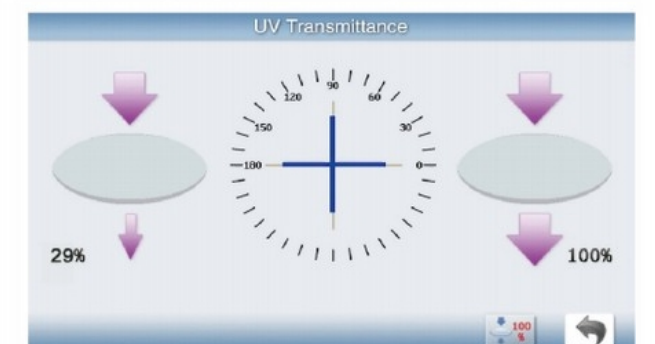

Transferencia rápida y sencilla de datos

Un puerto USB y un puerto RS232 permiten conectar el dispositivo a una computadora, un fotorrefractómetro o un refractómetro automático, facilitando la transmisión de datos para su almacenamiento o compartición con otros instrumentos. Asimismo, puede utilizarse para recargar el teléfono móvil.

